

OSREDOTOČEN NA LIPIDE

Spray & Clean

Raztopina Spray & Clean je namenjena čiščenju vseh polprepustnih kontaktnih leč (RGP). Odstranjuje obloge in ohranja kontaktne leče čiste in udobne.



Sprej 15 ml
brez konzervansov

Raztopina Spray & Clean se uporablja za dopolnilno čiščenje poltrdih kontaktnih leč. Poleg Spray & Clean je za vsakodnevno nego poltrdih kontaktnih leč potrebna uporaba večnamenske raztopine Menicare Pure in tedensko odstranjevalec proteinskih oblog Progent.

 **Menicon**

www.menicon.com

OSREDOTOČEN NA LIPIDE

Kako uporabiti Spray & Clean?

- 1. korak:** Posamezno lečo odstranite iz očesa in jo položite v svojo dlan in vsako stran kontaktne leče poskropite z enim razprškom raztopine Spray & Clean.
- 2. korak:** Kontaktno lečo v svoji dlani pazljivo podrgnite s prstom oz. s prijemom dveh prstov. Kontaktno lečo vstavite v vaš nosilec kontaktnih leč in jo sperite z MENICARE PURE.
- 3. korak:** Posodico za kontaktne leče napolnite z MENICARE PURE in zatesnite s pokrovčkom.
- 4. korak:** Pred vstavitvijo kontaktne leče predhodno sperite z MENICARE PURE. Kontaktne leče nato lahko nosite. Preostanek raztopine iz posodice za leče zavržite.

Pogostost uporabe

Lahko se uporablja vsakodnevno pri pacientih z mastnimi solznim filmom.

Sestava

- natrijev olefin sulfonat 0,75%
- PEG oktilfenileter 0,45%
- dinatrijev EDTA 0,02%
- prečiščena voda q.s. 100



Sprej 15 ml
brez konzervansov

 **Menicon**
www.menicon.com

CE 0483 MENICARE PURE proizvaja Menicon Co., Ltd, PROGENT in Spray & Clean proizvaja Menicon Pharma SAS. Prosimo pazljivo preberite navodila za uporabo pri vsakem produktu.

Za dodatne informacije se obrnite na distributerja za Menicon v Sloveniji: Optimed medical d.o.o. , Litostrojska 44c, 1000 Ljubljana.