

Free of  
Parabens!

Helps you getting pregnant!

## Prefert<sup>®</sup> Vaginal Gel

### Slovenščina

Navodilo za uporabo



### Prefert<sup>®</sup> Vaginalni gel

Vaginalni lubrikant pri želji po zanositvi

**Pred uporabo preberite navodila za uporabo!**

**Način učinkovanja:** Gel Prefert<sup>®</sup> spodbuja aktivnost spermijev v času ovulacije:

- spermijem daje optimalno okolico
- idealna pH-vrednost za naravno oploditev
- izboljša gibljivost spermijev v primerjavi s klasičnimi lubrikanti
- zmanjša osmotsko pregrado za spermije
- izboljša osmolarnost

**Čas uporabe:** V 3 najbolj plodnih dneh ženskega cikla (čas ovulacije). Uporabite enkrat v 24 urah.

**Uporaba:** Vnesite 5 minut pred spolnim odnosom.

1. Pred spolnim odnosom uporabite brizgo za enkratno uporabo Prefert<sup>®</sup> Vaginal Gel in aplikator za večkratno uporabo.
2. Z brizge odstranite siv pokrovček.
3. Na brizgo nataknete aplikator. Vaginalni aplikator vstavite v nožnico.
4. Pritisnite na žig na brizgi in tako potisnete gel Prefert<sup>®</sup> Vaginal Gel v nožnico. Brizgo odstranite iz aplikatorja.
5. Aplikator izperite in ga shranite za naslednjo uporabo.
6. Sedaj ste pripravljeni na spolni odnos. Vsebina pakiranja je za 4 uporabe.

Po uporabo zavržite prazno brizgo med gospodinjske odpadke.

Vaginalni aplikator očistite in izperite s toplo vodo. Za večkratno uporabo.

**Ne vsebuje parabenov.**  
**Klinično testirano v Nemčiji.**

**Opozorilo:** Gel Prefert<sup>®</sup> Vaginal Gel ni kontracepcijski gel. Prefert<sup>®</sup> ne ubija celic spermijev in ne vpliva na funkcijo spermijev. Če gel Prefert<sup>®</sup> Vaginal Gel povzroči draženje ali nelagodje, izdelek prenehajte uporabljati in se po potrebi posvetujte z zdravstvenim delavcem. Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom. Če ste imeli pred kratkim operativni poseg v nožnici, se pred uporabo posvetujte z zdravstvenim delavcem. Gela Prefert<sup>®</sup> vaginal gel ne uporabljajte, če imate aktivno nožnično okužbo.