

# Virus Protect STADA

pršilo proti navadnemu prehladu

## OPIS PRIPOMOČKA

VirusProtect STADA je pršilo za usta proti navadnemu prehladu. Je enostaven za uporabo in začne hitro delovati. VirusProtect STADA prekrije sluznico v ustni votlini in ustvari zaščitno bariero pred virusi navadnega prehlada. Bariera ujame viruse navadnega prehlada, jih deaktivira in jim prepreči širjenje ter razmnoževanje.

## INDIKACIJA

Za uporabo pri izpostavljenosti virusom prehlada ali zgodaj ob pojavu simptomov prehlada. VirusProtect STADA je primeren za odrasle in otroke, starejše od 4 let.

## NAMEN UPORABE

Zdravljenje in lajšanje navadnega prehlada.

## KLINIČNE KORISTI

- VirusProtect STADA ščiti pred virusi navadnega prehlada.
- VirusProtect STADA lahko pomaga skrajšati trajanje navadnega prehlada, če se ga uporabi v zgodnji fazi okužbe.
- VirusProtect STADA lajša simptome navadnega prehlada in blaži boleče grlo.

## PREVIDNOSTNI UKREPI

- Ne uporabljajte izdelka VirusProtect STADA, če ste preobčutljivi/alergični na katerokoli sestavino.
- Izdelka ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem, saj klinični podatki niso na voljo.
- Brez posveta z zdravnikom izdelka ne uporabljajte po kirurških posegih v ustih in/ali grlu dokler se rane ne zacelijo.
- Pri uporabi pršila ne vdihavajte, saj lahko povzroči draženje dihalnih poti, kar vodi v kašelj in hripavost.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom, da se izognete nezgodam z majhnimi delci.
- Če imate povišano telesno temperaturo ali če so vaši simptomi hujši kot pri običajnem navadnem prehladu, se posvetujte z zdravnikom, saj so le-ti lahko posledica česa drugega.
- Da se prepreči širjenje bolezni, naj izdelek uporablja le en uporabnik.

## KONTRAINDIKACIJE

- Ni znanih kontraindikacij.

## MOŽNI NEŽELENI UČINKI

- Ni znanih neželenih učinkov.

Če med uporabo izdelka VirusProtect STADA opazite nepričakovane učinke, se obrnite na zdravnika za nasvet.

## NAVODILA ZA UPORABO

### Kdaj uporabljati

Z uporabo izdelka VirusProtect STADA začnite ob morebitni izpostavljenosti virusom navadnega prehlada ali čim prej, ko opazite simptome navadnega prehlada. Z uporabo izdelka VirusProtect STADA nadaljujte, dokler se simptomi ne olajšajo.

### Kako uporabljati

1. Odprite usta in nastavek (šobo) usmerite proti grlu (slika 1).
2. Prtisnite na pršilko in 2-krat razpršite (en odmerek) vsako drugo uro do 6-krat na dan v času, ko ste izpostavljeni virusu prehlada.



Slika 1


## KAKO DELUJE

VirusProtect STADA vsebuje dve glavni sestavini, glicerol in tripsin iz trske, ki skupaj zagotavljata učinkovito bariero, ki deluje na tri načine:

**Ujame:** Glicerol ustvari osmotsko aktivno prehodno bariero, ki ujame viruse.

**Deaktivira:** Tripsin zavira zmogljivost virusov za vezavo in deaktivira njihovo zmogljivost okužbe celic.

**Ščiti:** Bariera izdelka VirusProtect STADA ščiti ustno votlino in grlo.

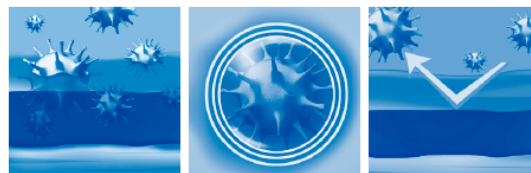

UJAME

DEAKTIVIRA

ŠČITI

## VirusProtect STADA JE NA VOLJO V NASLEDNJEM PAKIRANJU:

- VirusProtect STADA 20 ml

## PAKIRANJE IZDELKA VirusProtect STADA VSEBUJE:

- Pršilo za usta, ki ga sestavljajo plastenka, pršilka, nastavek (šoba) in zaščitni pokrov.
- Raztopina izdelka VirusProtect STADA vsebuje glicerol, vodo, naravni encim - tripsin iz trske, etanol (< 1 %), kalcijev klorid, trometamol in mentol. Raztopina je brez sladkorja in ne vsebuje konzervansov, glutena ali laktoze.
- To navodilo za uporabo.

## RAVANJE IN SHRANJEVANJE

- Uporabite pred iztekom roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatlici.
- Shranjujte pri temperaturi 25 °C ali manj.
- Neuporabljen izdelek vrnite v lekarno.

## POMEN SIMBOLOV



Preglej navodila za uporabo!



Zgornja omejitev temperature



Uporabno do



Številka serije



Referenčna številka



Proizvajalec



Pozor! Preglej navodila za uporabo!

**Kontakt za Slovenijo:**  
Stada d.o.o.  
Dunajska cesta 156  
1000 Ljubljana



**PROIZVAJALEC**  
Enzymatica AB  
IDEON Science Park  
SE-223 70 Lund, Švedska  
www.enzymatica.com

Več informacij na [www.stada.si](http://www.stada.si)

ColdZyme®



101026 VirusProtect STADA 20 ml

MEDICINSKI  
PRIPOMOČEK

CE  
0477

9297214  
2008  
HR/SI  
L001CS-01